

腹腔鏡・胸腔鏡用レンズ洗浄器

製品コード:KE-M-1701

スプラッシュクリン[®]

画面の汚れにイライラしたことはありませんか？

手術時間の約**7%**はスコープの
クリーニングに費やされています。



たった5秒!
スコープの先端を
差し込むだけ!

1ステップで素早く洗浄～乾燥!

汚れを**5秒で落とす**画期的なデバイスです。
スコープを出してから入れるまでわずか**10秒!**



詳細は右記QRより
動画をご覧ください。




製品コード:KE-M-1701

- ◎一般医療機器
- ◎内視鏡用レンズ洗浄具
- ◎単回使用
- ◎ガンマ線滅菌品
- ◎外径10mm内視鏡専用
- ◎医療器械登録番号:10B3X10006000001

セット方法 ~2ステップで簡単セットアップ!~

STEP 1 吸引器と接続



オペ室にある吸引ポンプや通常の吸引ポンプが使用できます。

STEP 2 5mlシリンジをセット



42℃位に加熱した、滅菌精製水滅菌済み生理食塩水を使用します。

使用方法 ~差し込むだけで、素早く洗浄&乾燥!~



スコープを装着

わずか5秒!




スコープを洗浄



スコープを離す

汚れたスコープを綺麗にする効果的方法

汚れ

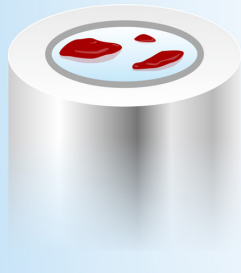


従来法

ガーゼでこする



汚れが伸びて落ちない

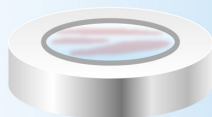

本製品


浮かせて流す



きれいに落ちる



製品寸法図

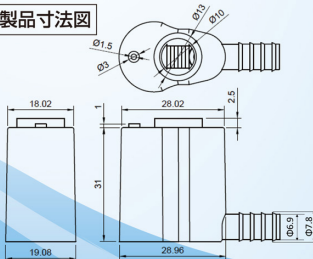

構造と洗浄原理

